



medemagruppen



Quick guide Jazzy 1170 II

Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35



Indholdsfortegnelse

Quick guide Jazzy 1170 II.....	4
Introduktion.....	4
Betegnelser	5
Betegnelser - knapper	6
Betjening	6
Tænd/sluk for ur	7
Indstil hastighed	8
Indstilling af sæde - ryg og benstøtter	9
Tænd/sluk lyset	10
Indstilling af skærmlys	10
Indstilling af skærm-miljø	11
Indstilling af klokken	12
Fejlkode	14
Opladning	15
Serienummer.....	16
Kørsel med Jazzy 1170 II.....	16
11 gode råd til kørsel på Jazzy:	17
Kørsel på offentlig vej:	18
Kørsel på trapper/rulletrapper	18
Bremser	19
Motorbremsning:	19
Parkeringsbremse:	19
Frikobling:	19
Internationale adresser	21



Quick guide Jazzy 1170 II

Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye elkørestol, Jazzy 1170 II. De har nu overtaget et eldrebet køretøj, som er udviklet til såvel indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske kørestole.

For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i Brugervejledningen. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet Kørsel med Jazzy 1170 II.

Bemærk:

Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen. Man kan derfor ikke forvente, at oplysningerne i Quick Guiden er fyldestgørende.

NB: Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Advarsel!

Køretøjet må ikke lånes ud til personer, som ikke er fortrolige hermed.

Køretøjet er beregnet til én person.

Maks. personvægt 155 kg. Kan specialtilpasses fra fabrikken til en personvægt på 200 kg.

Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller u hensigtsmæssig benyttelse af Jazzy 1170 II.




Betegnelser

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i denne vejledning.




Betegnelser - knapper

Dynamic DX2 AJR		
	1	Start/stop-knap
	2	Blinklys venstre
	3	Blinklys højre
	4	Funktionsvælger
	5	Display
	6	Hastighedsvælger
	7	Tilbehørsvælger
	8	Horn

Betjening

I toppen af displayet finder man statusbjælken. Batteriindikator vises hele tiden. Uret kan slås til eller fra efter ønske. De øvrige lyser, når den tilhørende funktion er aktiv.

	
	1 2 3 4 5 6
1	Batteriindikator Grøn = fuldt opladet Gult = mindst halv fuld Rød = næsten tom - oplad nu!
2	Blinklys venstre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner
3	Lyset er tændt
4	Fejlkode - se afsnit om fejlkoder
5	Blinklys højre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner
6	Aktuel tid

Tænd/sluk for ur



Tryk på pil op/ned eller joystick (pres fremad) indtil ovenstående ikon vises i centrum.



Brug "funktionstasten" til at skifte mellem X og ✓.

Acceptér med et tryk på pil op/ned tasten.


Indstil hastighed

Når man tænder joysticken vises nedenstående billede i displayet. I midten vises den hastighed man har valgt som maks. hastighed. Hastighed vælges ved at trykke på plus/minus tasten. Maks. hastighed er 5, laveste hastighed er 1.



De nederste funktioner vælges med knappen "funktionsvælger".

Indstilling af sæde - ryg og benstøtter

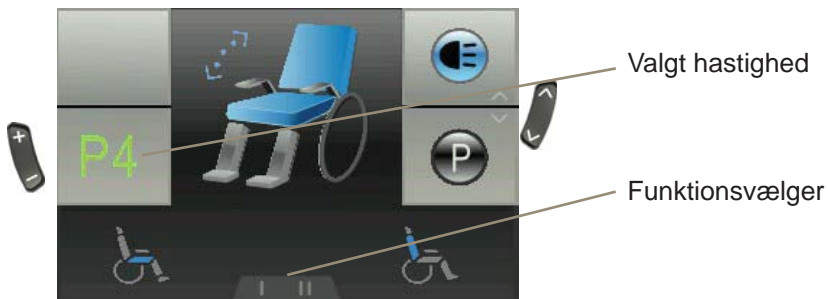


Tryk på pil op/ned indtil billedet viser stolen. Brug "funktions-vælgeren" til at vælge den funktion der ønskes ændret. Brug joysticket til at ændre f.eks. vinklen på sæderyggen.

Funktion	Ikone
Tilt	
Ryginkel	
Sædehejs	
Venstre benstøtte	

Funktion	Ikone
Højre benstøtte	
Fodstøtter begge	
Liggende	
Nakkestøtte	

Kun de tilgængelige indstillinger vil blive vist.

Tænd/sluk lyset

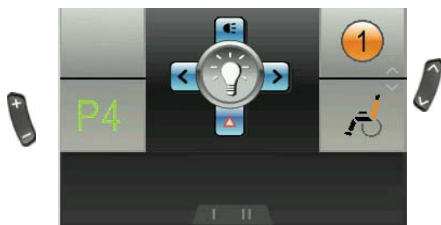


Tryk på pil op/ned indtil ikonet for lys fremkommer i centrum.

Pres herefter joysticket fremad for at tænde lyset. Pres igen fremad for at slukke lyset.

Pres joysticket tilbage for at aktivere katastrofeblink. Og på samme måde slukkes det igen.

Pres joysticket til højre eller venstre for at aktivere blinklyset. Og på samme måde slukkes det igen.

Indstilling af skærmlys

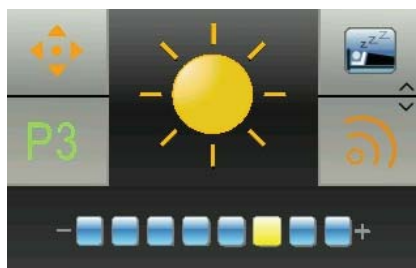


Tryk på pil op/ned til solen fremkommer i centrum. Brug joystick frem for at komme ind i indstillinger. Brug derefter tasten "funktionsvælger" eller joystick højre/venstre til at ændre på lysstyrken.

Joystick frem/tilbage eller pil op/ned accepterer de nye værdier og returnerer til hovedmenuen.

Indstilling af skærm-miljø

Brug pil op/ned indtil "dag/nat" ikonet vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

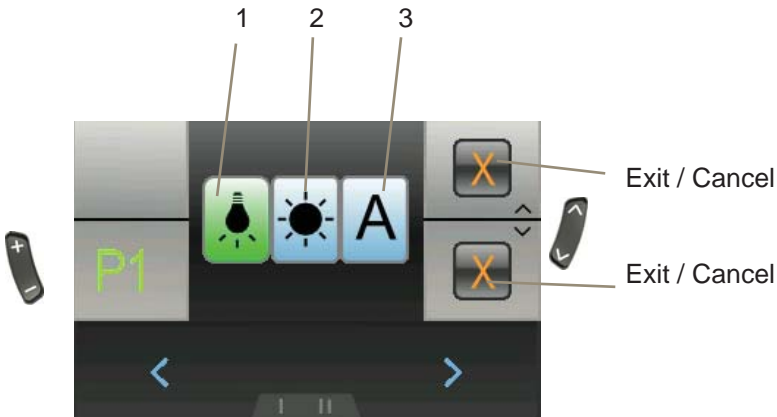

Opsætning	Resultat
1 - Indendørs	Skærmen har sort baggrund
2 - Udendørs	Skærmen har hvid baggrund
3 - Automatisk	Skærmen skifter baggrundsfarve (sort/hvid) afhængig af lyset i omgivelserne.

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre for at vælge indstilling.


Joystick fremad accepterer de nye indstillinger og returnerer til hovedmenuen.

Joystick tilbage eller pil op/ned annullerer de nye indstillinger og går tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af klokken



Brug pil op/ned indtil uret vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

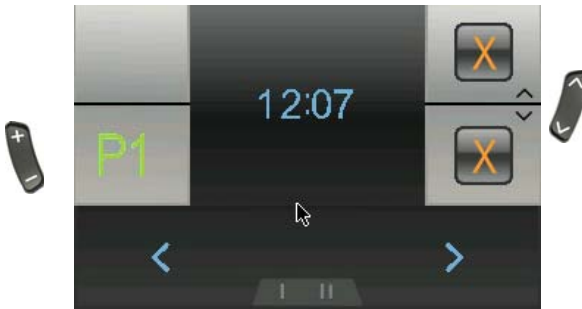

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre til at vælge det ciffer der skal ændres.

Joystick fremad tæller op.

Joystick tilbage accepterer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Pil op/ned annullerer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Systemlås



For at låse DX systemet



Tryk på tænd/sluk knappen i 4 sek. mens systemet er tændt. Systemet vil nu lukke ned i låst tilstand.

For at låse DX systemet op



Tryk på tænd/sluk knappen. Systemet vil vise en lås i displayet.




Tryk på hornet 2 gange indenfor 10 sek. Systemet vil starte op på normal vis.

Fejlkode

Kode	Årsag	Betydning
1	DX Modulet	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fejl i programmering - fejl i ledningsforbindelsen - intern fejl i et modul <p>Sluk for stolen og tænd igen. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>
2	DX Accessory	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kører langsom på grund af hævet sæde (programmering). Ikke en fejl <p>Sænk sædet til nederste position. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>
3	Motor 1 / L (M1)	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning <p>Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>
4	Motor 2 / L (M2)	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning <p>Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>
5	Parkeringsbremse 1 (M1 venstre)	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - løs forbindelse - kortslutning <p>Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>
6	Parkeringsbremse 2 (M2 højre)	<p>Kan betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - løs forbindelse - kortslutning <p>Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).</p>



Opladning

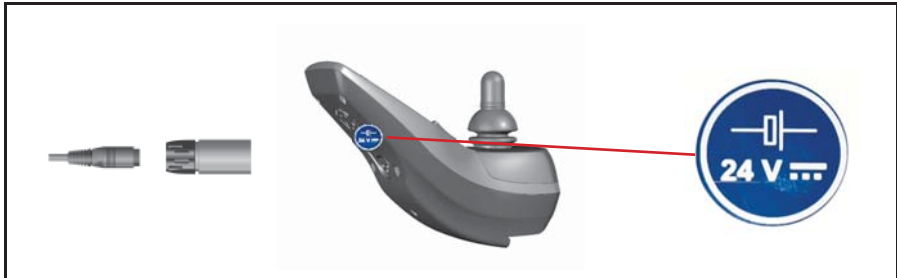

Opladning

1	Sæt stikket i styreboksen på stolen
2	Sæt stikket i vægudtaget eller slå laderen til
3	Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er startet.
4	Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen.

Det anbefales, at batterierne lades op hver nat, hvis stolen har været benyttet. (Yderligere information i Brugervejledningen)

Bemærk:

Hvis batterierne er beskadigede eller lækker, bør al kontakt med dem undgås for at undgå ætsningskader.

Kontakt et kvalificeret værksted snarest muligt!

Udskiftede batterier skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for sikker bortskaffelse.

Yderligere information i Brugervejledningen.

Serienummer

På alle kørestole er der et serienummerskilt med produktionsår, måned, samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også findes på forsiden af Brugervejledningen.

Opgiv venligst serienummeret ved henvendelse om service, reservedele osv.

Kørsel med Jazzy 1170 II

Inden De sætter Dem i, eller forlader køretøjet, skal De tjekke:

- A. At kørestolen er slukket, og at kørestolen ikke er frikoblet.
- B. At kørestolen og sædet, som man flytter sig til, står stabilt.
- C. Undgå at støtte med fuld kropsvægt på fodstøtterne. Ellers kan stolen tippe frem.

Under kørsel skal armene være placeret på armlænene og fødderne på fodstøtterne.

Kabler og ledninger skal være fastmonteret med strips.

Forsøg aldrig at forcere forhøjninger og kantsten højere end 10 cm, og da altid lige på, så for- og baghjul altid bevæger sig i en lige linie.

Bemærk!

Hvis Deres Jazzy / bil er udstyret med docking system fra Dahl Engineering, skal De være opmærksom på, at frihøjden ændres til 9 cm.

Læs mere i Brugervejledningen om kørsel på bakker, op- og nedadhældning ved kørsel og kørsel på offentlig vej.



11 gode råd til kørsel på Jazzy:

- Sæt farten ned ved kørsel rundt i sving og reducér også farten ved kørsel ned ad bakke.
- Sæt farten ned ved kørsel på stigninger. Maks. stigning = $6^\circ = 10\%$
- Sæt farten ned ved kørsel på skråninger med sidehældning. Maks. sidehældning = 10°
- Undgå kørsel og parkering i regnvejr
- Undgå parkering på sne og is.
- Parker altid på et plant (fladt) sted.
- Undgå terrænkørsel.
- Undgå at køre på isglatte kørebaner eller glatte overflader (eks. sne eller nyslået græs)
- Undgå at forcere kantsten højere end 10 cm. Hvis det er en stol med docking-system er frihøjden nede på 9 cm.
- Undgå at køre skråt op og ned over kantsten. Risiko for at vælte.
- Må ikke bruges til at trække vogne o.l.

Bemærk:

Det er forbudt at køre Jazzy i påvirket tilstand. Det gælder både medicin og alkohol.



Kørsel på offentlig vej:

Når De kører på offentlige veje, fortove, cykelstier, fodgængerovergange, gågader, parkeringspladser, indkøbscentre osv., skal De være meget opmærksom på at tilpasse hastigheden og afstanden til medtrafikanter. Ved 7 km/t skal De følge de færdselsregler, som gælder for cyklister. Det betyder også, at De skal køre med lys i lygtetændingstiden. (Ekstraudstyr)

På fortove må hastigheden maks. være 6 km/t. Her betragtes man som fodgænger.

Bemærk:

Gå som hovedregel ud fra, at andre trafikanter ikke får øje på Dem, når De sidder på Jazzy'en. Pas derfor meget på og afvent, at vejen er fri for andre trafikanter, før De krydser vejen.

Kørsel på trapper/rulletrapper

Gør det ikke. De kan forvolde store skader på Dem selv og andre.



Bremser

Jazzy'en er udstyret med 2 sæt bremses: motorbremse og parkeringsbremse.

Motorbremning:

Ved kørsel ned ad bakke bremses Jazzy'ens styreenhed, og motoren vil bremse.

Parkeringsbremse:

Når køretøjet står stille og joystikken ikke berøres, aktiveres automatisk en magnetbremse på hver drivenhed.

Bemærk:

Jazzy må ALDRIG bremses ved at slukke på 1/0 knappen under kørsel, da magnetbremsen herved slår til med en voldsom opbremsning med vælterisiko til følge.


Frikobling:

Jazzy er udstyret med 1 frikoblingshåndtag, bag på køretøjet.

Advarsel!

Når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet sat ud af drift. Frikobling må ALDRIG ske på skrånende terræn



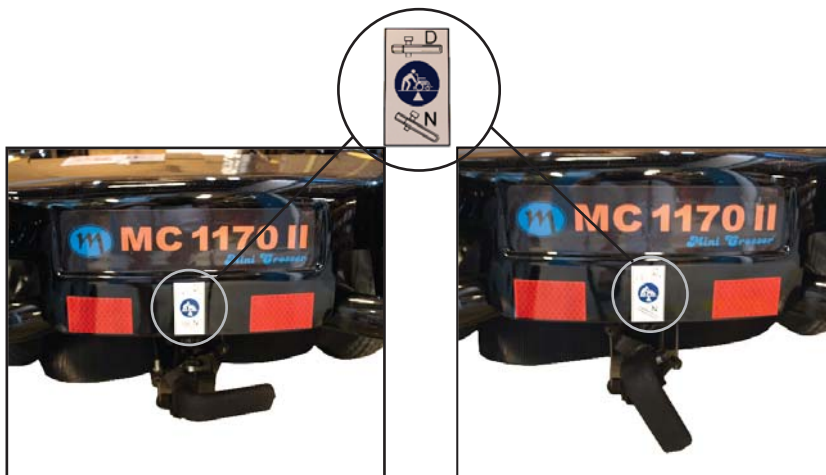

Normal position for kørsel (Vip håndtaget lidt ud og drej op).

Position for frikobling (Vip håndtaget lidt ud og drej ned).

Internationale adresser

Australien / New Zealand

Pride Mobility Products
21 Healey Road
Dandenong 3175 Victoria
Australien
Tlf: +61 3 9706-4611
Fax: +61 3 9706-4622
Email: prideaustralia@pride-mobility.com.au
Internet: www.pridemobility.com/international/Australia/australia.asp

Belgien

Mobile Belgium
Blankenbergsesteenweg 14
B-8000 Brugge
Tlf: +32 (0)50 31 79 19
Fax: +32 (0)50 31 10 26
Email: info@mobilescooter.be
Internet: www.mobilescooter.be

Danmark

Hovedkontor/Jylland:

Medema Danmark A/S
Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning
Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35
E-mail: info@medema.com
Hjemmeside: www.medema.dk

Danmark

Sjælland:

Medema Danmark A/S
Ådalen 9
4600 Køge
Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 56 64 33 88
E-mail: info@medema.com

Danmark

Fyn:

Medema Danmark A/S
Sivlandvænget 6
5260 Odense S
Telefon: 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com

England

Mini Crosser Ltd
The Coach House
Westonbirt
Tetbury
Glos
GL8 8QS
Sales, tel: +(44) 0800 043 0029
Service & Warranty, tel: +(44) 0800 169 9588
Email: sales@mini-crosser.co.uk
Internet: www.mini-crosser.co.uk

Finland

Respecta OY
Tenholantie 12
00280 Helsinki
Myyntipalvelu Tel: +358 (0)207649748
Email : myynti@respecta.fi
Fax :+358 (0)207649735
Huolto - ja varaosapalvelu Tel: +358 (0)207649747
Email : huolto@respecta.fi

Frankrig

ICARE
4 rue d'amsterdam
F-91250 TIGERY
Tef: +33 (0)1 60 78 94 84
Fax:+33 (0)1 69 13 09 78
Email: icarejmb@wanadoo.fr
Internet: <http://www.icare-jmb.com>



Holland

Richard van Seenus Nederland B.V.
Postbus 1425, 1300 BK Almere
Bolderweg 6, 1332 AT Almere
Tlf: +31 (0) 36 53 20 450
Fax: +31 (0) 36 53 21 308
Email: info@vanseenus.nl
Internet: www.vanseenus.nl

Norge

Medema gruppen AS
Postbox 133
N-1483 Skytta
Tlf: +47 67 06 49 00
Fax: +47 67 06 49 90
Email: firmapost@medema.no
Internet: www.medema.no

Schweiz

Degonda Rehab SA
Industriestrasse 12
CH-3661 Uetendorf
Tlf: +41 033 345 83 00
Fax: +41 033 345 83 01
E-Mail: info@turbo-twist.ch
Internet: www.turbo-twist.ch

Spanien

Assessorament I Mobilitat. S.L.
Marqués de Monistrol, Local 3 (esq.
C./ Girona, 29-31) 08980 Sant Feliu de
Llobregat - Barcelona.
Teléfono +34 93 666 55 23
Fax. +34 93 666 88 85
E-mail: info@assessoramentimobilitat.com
Internet: <http://www.assessoramentimobilitat.com>

Sverige

Minicrosser AB
Bultgatan 28
S-442 40 Kungälv
Tel: (+46) 303 245 200
Fax: (+46) 303 245 228
Email: info@minicrosser.se
Internet: www.minicrosser.se

Tyskland

Baden Württemberg

Draisin GmbH
Von-Drais-Straße 35
77855 Achern
Tel (+49) 0 78 41 66 77 0
Fax (+49) 0 78 41 66 77 88
Email: info@draisin.com
Internet: www.draisin.com/

Tyskland

Baden Württemberg

Elofahrm Palm
Finkenweg 27
D-76571 Gaggenau
Tlf: +49 07225 918 831
Fax: +49 07225 988 070
Mobil: +49 0171 314 7726
Email: uwepalm@web.de

Tyskland

Bayern

Sanitätshaus Gebhardt
Nikolaistrasse 10
83022 Rosenheim
Tel (+49) 0 80 31 15 46 6
Fax (+49) 0 80 31 34 76 2
E-mail: info@ot-gebhardt.de
Internet: www.sanitaetshaus-gebhardt.de/



**Tyskland
Berlin, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Brandenburg und
Sachsen**

Conze Elektro-Mobile
Britzer Damm 12
D-12347 Berlin
Tlf: +49 030 6789 7969
Fax: +49 030 6789 7968
Email: info@elektro-mobile.de
Internet: www.elektro-mobile.de

**Tyskland
Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland und Unterfranken**

Beromobil GmbH
Elektromobile Treppenlifte
Draiser Weg 16
D-65346 Eltville-Erbach
Tlf: +49 06123 - 60 57 22
Fax: +49 06123 - 60 57 23
Email: info@beromobil.de
Internet: www.beromobil.de

**Tyskland
Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Nordrhein
Westfalen**

Wiggers GmbH - Reha / Rollstuhl Werkstatt
Gerhard Stalling Strasse 47 B
D-26135 Oldenburg
Tlf: (+49) 0441 36 111 302
Fax: (+49) 0441 36 111 309
Email: wiggers.gmbh@ewetel.net
Internet: www.minicrosser.info; www.ot-wiggers.de

USA / Canada

Pride Mobility Products Corp.
182 Susquehanna Ave.
Exeter, Pa. 18643
USA
Tlf: +1 800 800 8586
Fax: +1 800 800 1636
Internet: www.pridemobility.com

Østrig

Sanitätshaus Gebhardt
Nikolaistrasse 10
83022 Rosenheim
Tel (+49) 0 80 31 15 46 6
Fax (+49) 0 80 31 34 76 2
Internet: www.sanitaetshaus-gebhardt.de/





medemagruppen