

## Transportfester 3231-7300 Monteringsanvisning

- 1 stk. setebærer venstre med utstansede festepunkter (merket med kroksymbol)
- 1 stk. setebærer høyre med utstansede festepunkter (merket med kroksymbol)

1



2

Du trenger følgende verktøy:

- Unbracotrekker str. 3
- Unbracotrekker str. 4
- Fastnøkkel 10 mm



3

- Løsne og ta ut den fremre forsenkede unbracoskruen som forbinder setebæreren med understellet.



4

- Løsne og ta ut den bakre skrueforbindelsen. (Legg merke til rekkefølgen på pakning og distansestykke, slik at disse kommer på riktig plass ved tilbakemonteringen.) Løsne setebæreren.



5

- Løsne den sigdformede perforerte platen fra setebæreren. Ta vare på skruene til senere bruk.



6

- Monter så den sigdformede perforerte platen på den nye setebæreren med transportfester.



7

- Monter deretter den nye setebæreren på understellet ved først å skru den fast i framkant.



8

- Skru den deretter fast i bakkant. Se til at pakningen og distansestykket kommer i riktig rekkefølge.



Stram til alle skruer ordentlig.



Beskrivelsen gjelder montering på én side. Montering på motsatt side utføres på tilsvarende måte.