



medemagruppen



Quick guide Lunetta Victory Sport

Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35



Indholdsfortegnelse

Quick guide Lunetta Victory Sport	4
Introduktion.....	4
Betjeningspanel.....	5
Klargøring / tilpasning	7
Vinkeljustering af styr	7
Spejlposition	8
Højdejustering af sæde	9
Sædedrej/ sæde frem og tilbage	10
Ryglænsjustering.....	11
Batterier og opladning	11
Batteriindikator	12
Serienummer.....	13
Kørsel med Lunetta Victory Sport	13
Sikkerhed	15
Ved kørsel i trafikken.....	16
Bremsesystemer.....	17
Egne notater.....	18



Quick guide Lunetta Victory Sport

Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne køretøj, Lunetta Victory Sport. De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til anvendelse udendørs for aktive brugere. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske scootere.

For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i Brugervejledningen. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet Kørsel med Lunetta Victory Sport.

Bemærk:

Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen. Man kan derfor ikke forvente at oplysningerne i Quick Guiden er fyldestgørende.

NB: Der tages forbehold for trykfejl, og ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Advarsel!

Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige hermed.

Køretøjet er beregnet til én person.


Max personvægt 95 kg.

Medema Production A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker benyttelse af Lunetta Victory Sport.



Betjeningspanel


Undgå at betjeningspanelet udsættes for stød og slag. Vær forsigtig ved kørsel og undgå at ramme forhindringer.

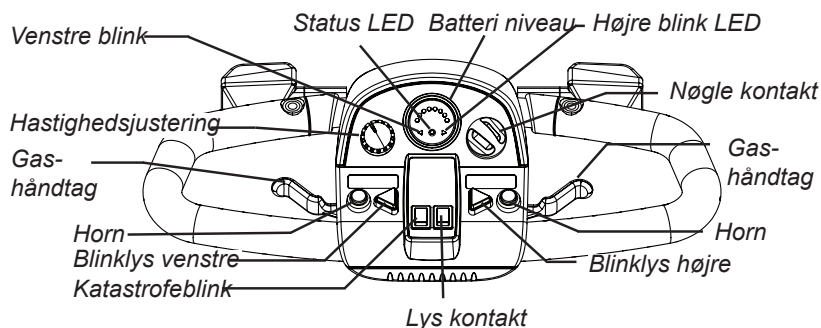

Betegnelse	Beskrivelse
Nøglekontakt	For at starte køretøjet: Drej nøglen med uret for at tænde for Deres Scooter. Drej nøglen mod uret for at slukke for Deres Scooter. Når nøglen tages ud skal dækslet altid lukkes ned over nøglekontakten, for at undgå indtrængen af fugt.
Hastighedsvælger	Her forindstilles eller begrænses Scooterens tophastighed. Skildpadden repræsenterer lavest mulige tophastighed. Haren repræsenterer højest mulige tophastighed, 12 km/t
Batteriindikator	Når Scooteren er tændt, angiver batteriindikatoren den omtrentlige batterikapacitet ved hjælp af en farvekode. Fra højre til venstre på måleren angiver grønt fuldt opladede batterier, gult en spændingsafledning, og rødt angiver øjeblikkelig behov for genopladning.
Gasregulering	Dette håndtag gør det muligt at styre hastigheden frem og tilbage på Deres Scooter op til den forudindstillede max. hastighed. Brug højre hånds to fingre til, at aktivere gashåndtaget langsomt, for at køre fremad. Brug venstre hånds to fingre til, at aktivere gashåndtaget langsom, for at køre baglæns.



Betegnelse	Beskrivelse
Lyskontakt	Tænder for- og baglygter. Nøglekontakten skal dog være drejet i stilling ON (kørestilling).
Katastrofeblink	Tænder alle blinklysene på én gang. Virker også når nøglen er fjernet, eller er drejet i OFF (stop stilling).
Blinklyskontakt	Pil venstre: blinklys venstre side. Pil højre: blinklys højre side. Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene.
Horn	Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk på hornkontakt.
Ladestik	Sluk for nøglekontakten under opladningen. Bemærk at det ikke er muligt at køre, imens batterierne oplades. Se i øvrigt afsnittet "Batterier og opladning".

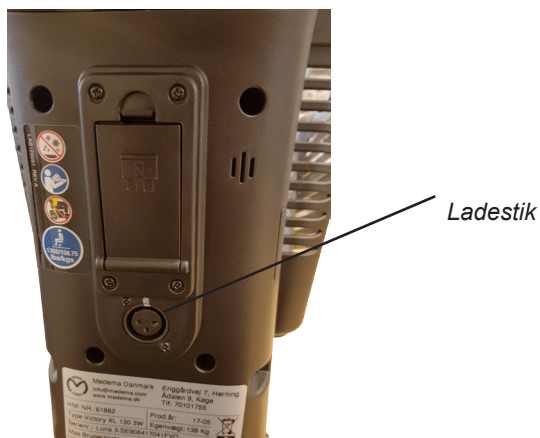

Klargøring / tilpasning

Vinkeljustering af styr


Deres scooter er udstyret med et justerbart drejeligt styr.

Før De begynder at justere på styret, fjern da først nøglen fra nøglekontakten.


Bemærk!

Forsøg aldrig at justere på styret under kørsel. Eller hvor Lunetta Victory Sport er i bevægelse.

- Understøt styret, mens De drejer styrets justeringsgreb mod uret for at løsne styret.
- Flyt styret til en bekvem stilling.
- Drej styrets justeringsgreb med uret for at fastgøre styret i stillingen.

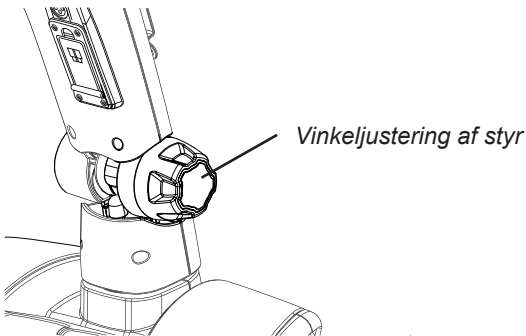

Spejlposition

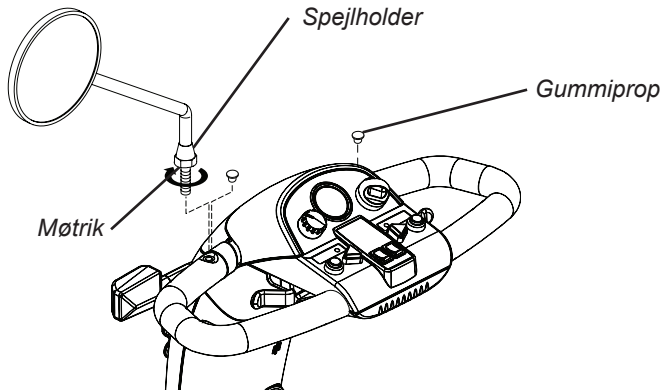


Montage

- Beslut, på hvilken side spejlet skal monteres, og fjern gummiproppen fra styrhåndtagets overside.
- Isæt den gevindskårne del af spejlholderen i åbningen, og drej den med uret, til den sidder stramt til.
- Drej om nødvendigt møtrikken med uret for at fastgøre spejlet på sin plads.

Sådan justeres spejlet:

- Anbring Dem i en siddende kørestilling vendende fremad.
- Juster spejlet til venstre, højre, op eller ned, til De har en god synslinje bag Dem.

Højdejustering af sæde

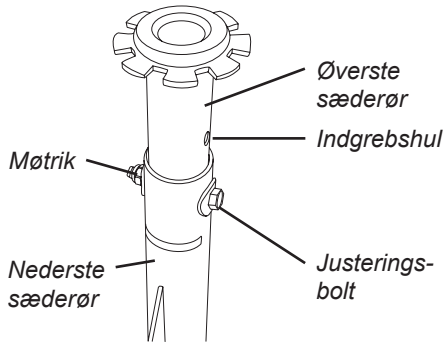

*Sæderøret justeres uden at sædet er på.
Fjern sæde og evt. afdækning fra
Deres Lunetta Victory Sport.*

- Fjern sædets justeringsbolt.
- Hæv eller sænk den øverste sædestolpe til den ønskede sædehøjde.
- Hold den øverste sædestolpe i den højde, og ret placeringshullerne i øverste og nederste sædestolpe ind efter hinanden.
- Sæt sædets justeringsbolt ind i placeringshullerne på både øverste og nederste sædestolpe.
- Monter igen møtrikken på sædets højdejusteringsbolt, og spænd den.
- Genmonter bagerste afskærmning og sædet.

Sædedrej/ sæde frem og tilbage

Sædedrej


Udløserhåndtaget skubbes frem. Sædet kan drejes 90° til hver side. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45°.

- Skub sædets drejehåndtag fremad for at frigøre sædet.
- Drej sædet til den ønskede stilling.
- Frigør grebet for at fastlåse sædet i stillingen. Drej sædet til det går i indgreb.

Sæde frem / tilbage

De kan skubbe sædet frem eller tilbage for at justere afstanden mellem sæde og styr.


- Flyt sædets skydehåndtag anbragt på nederste venstre side af sædet udad.
- Hold håndtaget ude, mens sædet skydes fremad eller tilbage.
- Frigør sædets skydehåndtag, når sædet befinder sig i den ønskede position. Sædet skal gå i indgreb, før den er stabil.

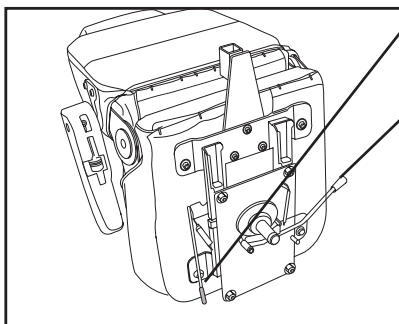

Udløserhåndtag for sæde frem/tilbage.

Udløserhåndtag for sædedrej.

Ryglænsjustering

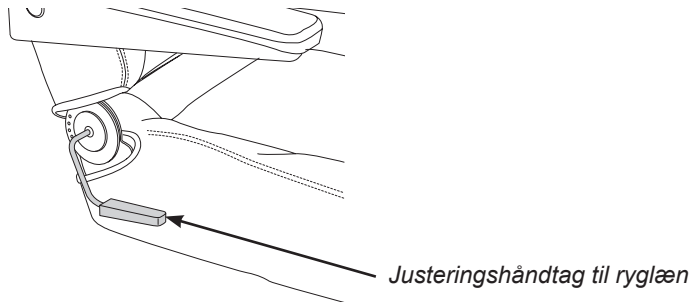

Indstil ryglænets vinkel således:

- Med ryggen trykket mod ryglænet, løftes i ryglænets justeringshåndtag. Læn Dem fremad eller tilbage for at justere ryglænets vinkel.
- Frigør ryglænets justeringshåndtag, når sædet befinder sig i en komfortabel kørestilling.

Batterier og opladning

Til Deres scooter skal der bruges to langtidsholdbare 12-volt, deep-cycle-batterier, der er forseglet og vedligeholdelsesfri. De oplades af den medfølgende eksterne lader.

Brug ikke andre opladere end den fra fabrikken medfølgende.

Vi anbefaler, at De ikke oplader Deres Lunetta Victory Sport's batterier i mere end 24 timer i træk.

Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen.

Batteriindikator

I forbindelse med en elektronisk fejl, vil et antal lamper i batteriindikatoren lyse. Nedenstående tabel viser hvad de betyder.

Yderligere information om problemløsning: Se Brugervejledningen.

Blink kode	Årsager	Afhjælpning
1	Batterier mangler opladning.	Oplad batterierne så hurtigt som muligt.
2	Lavt batterispænding. Batterierne skal lade med det samme.	Oplad batterierne så hurtigt som muligt.
3	Høj batterispænding.	Afbryd opladning. Eller sluk og tænd for Luna.
4	Batterispændingen er for høj til betjening af Luna.	Sluk for Luna i nogle få minutter, og tænd for Luna igen.
5	Luna er frikoblet.	Fjern nøglen, og skub frikoblingshåndtaget til kørestilling. Genstart Lunetta Victory Sport.
6	Gashåndtaget kan have været aktiveret under isætning af nøglen.	Tag nøglen ud. Slip gashåndtaget. Sæt nøglen i og tænd igen.
7	Fejl på gashåndtaget.	Kontakt den autoriserede forhandler for hjælp.
8	Motorspændingsfejl.	Kontakt den autoriserede forhandler for hjælp.
9	Andre interne fejl.	Kontakt den autoriserede forhandler for hjælp.



Serienummer

På alle køretøjer er et serienummerskilt med produktionsår, måned, samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også findes på første side i Brugervejledningen.

Opgiv venligst serienummeret ved henvendelse om service, reservedele osv.

Kørsel med Lunetta Victory Sport

Ind- og udstigning

Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Lunetta Victory Sport.

I hovedtræk bør følgende metode benyttes:

- Vip styrstammen op i lodret position.
- Drej eventuel sædet 45° eller 90° og vær sikker på, at sædelåsen er låst (faldet i hak).
- Vip eventuelt armlænet op.

Udstigning

Bring Lunetta Victory Sport til standsning:.

- Drej nøglen til OFF og tag den ud af nøglekontakten.
Løft udløserhåndtaget og drej sædet ud til siden. Den skal gå i hak.
Stig forsigtigt ud af Lunetta Victory Sport.
Efterlad evt. sædet i denne position, så er det nemt næste gang De skal bruge Lunetta Victory Sport.

Vigtigt!

Lunetta Victory Sport vil automatisk slukke efter 20 minutters stilstand, selvom nøglen er drejet om i kørestilling.



For at genstarte køretøjet, skal nøglen drejes til stopstilling OFF derefter til kørestilling ON.



Sikkerhed

- Brug ikke Scooteren første gang før denne vejledning er læst og forstået i sin helhed.
- Lad ikke børn uden opsyn lege i nærheden af Deres Scooter, mens batterierne bliver opladet.
- Lad være med at fjerne anti-tip hjulene.
- Kontrollér at dækkene har korrekt dæktryk (bar / psi)
- Overskrid ikke stolens vægtgrænse.
- Lad være med at bruge mobiltelefon, walkie-talkie, bærbar computer eller andre former for radiosendere under kørsel.
- Undgå udsættelse for regn, sne, is, salt eller placering i vand, når det er muligt. Vedligehold og opbevar Lunetta Victory Sport i ren og tør tilstand.
- Fjernelse af jordbenet kan medføre elektriske farer. Sørg om fornødent for montering af en godkendt trebenet adapter i forbindelse med en elektrisk stikkontakt, der kun er beregnet til stikprop med to ben.
- Hold værktøj og andre metalgenstande på afstand af batteriets polklemmer. Berøring med værktøj kan medføre elektrisk stød.
- Lad være med at åbne batteripakken, før De har læst anvisningerne i brugervejledningen om, hvordan det gøres.
- Hold hænderne på afstand af dækkene under kørsel. Vær opmærksom på at løstsiddende tøj kan blive fanget af kørehjulene.



Ved kørsel i trafikken...

Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken:

Lunetta Victory Sport er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set Dem, før De kører ud på kørebanen.

Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej.

Højre- og venstresving i trafikkrøds. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere. Følg køreregler for cykler.

Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys? Hvor hurtigt nærmer biler sig? Osv.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Lunetta Victory Sport, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Lunetta Victory Sport, så snart det er sikkert at gøre det. En el-scooter kan under visse omstændigheder udløse butiksalarmer.

Lunetta Victory Sport opfylder de krav der er til el-scooterens anvendelse i et miljø med elektromagnetisk støj. Der kan alligevel forekomme sjældne tilfælde, hvor elektromagnetisk støj kan påvirke Lunetta Victory Sport. Så som radio- og TV stationer, amatør radiosendere og mobiltelefoner.

Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for Lunetta Victory Sport. Mobiltelefoner bør ikke anvendes under kørsel.



Bremsesystemer

Bremsesystemer på Lunetta Victory Sport:

- Regenerativt: Bruger elektricitet til hurtigt at bremse køretøjet, når gashåndtaget føres tilbage til midter- /stopstilling.
- Magnetbremse: Aktiverer mekanisk. Efter regenerativ bremsning bremser køretøjet, til det er tæt ved standsning, eller når strømmen til systemet fjernes af en eller anden årsag.
- Motorbremse - tilpasser køretøjets fart også ned ad bakke.



Egne notater







medemagruppen