

Monteringsanvisning

BINGO Evolution trommelbrems

For installasjonen trenger du verktøy som vist på bilde og skiftenøkkel størrelse 8 og 19



- Den originale pakken inneholder følgende komponenter:

- - 2 x luftfylte bakhjul hjul 290x60, sort 3 eikplastkant, trommelbrems
- - 2 x akselbolt- 2 x brakett
- - 2 x cutter zp DIN 934-8 VM12
- - 2 x luftfylte forhjul 190x50 2 x wire sett 1,5m-
- 2 x bremsespak
- - 2 x knappodet sokkelskrue zp DIN / ISO7380 M6x40- 6 x skive zp A6,4 zp DIN / ISO 9021 A6,4
- - 2 x knappodeskrue, zp, koblingslås DIN / ISO 7380 M6x12
- - 2 x gjenget gjennomføring 8xM6x23
- - 4 x kabelbånd, svart, 5x180
- - 2 x kabelklips D 25
- - 2 x navdeksel KN-S-32/12

Fold ut vognen før installasjonen og ta av seteenheten.

- Trekk bakhjulet fra akselen.
- • Løsne og fjern skruen M8x45 inkludert skiven og armeringentallerken.
- • Sett inn akselbolten.
- • Sett inn skruen M8 x 45 inkludert låseskive og stram den til.




- Løsne mutter og ta av **del A**.




- Løsne og ta bort den andre mutter også.
- Ta av skruen.



- Sett på skive på aksel som.
- Monter **del A** tilbake på plass.

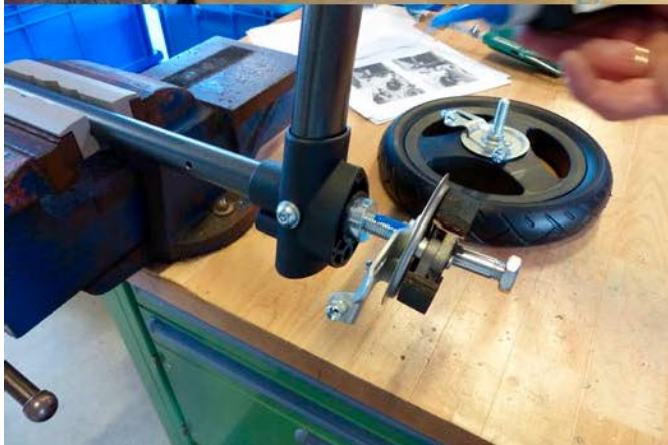


- Bruk Locktite og sett inn akselbolten inkludert **del A** som vist..

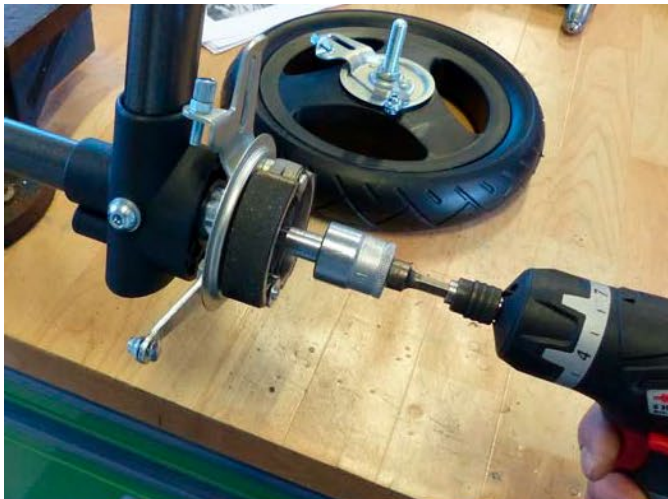

- Stram den og fjern mutteren.



- Borr et 6,5 mm hull gjennom rammen som vist.

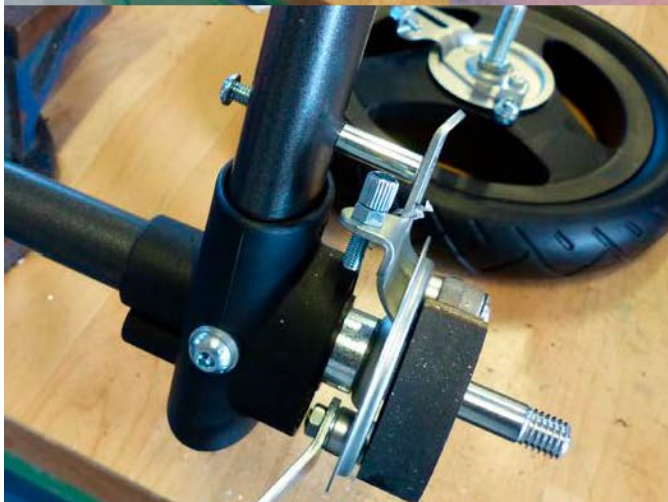

- Sett inn skruen M6x35 fra innsiden av rammen.
- Sett inn den gjengede gjennomføringen 8xM6x23 fra utsiden av rammen..
- Sett inn skruen M6x12 fra utsiden av rammen.



- Stram bolten ordentlig..



- Stram til mutter som vist.



- Sett inn hjulet som vist.



-
- Stram den med biloc-mutteren.



- Avslutt med plastpropp.



- Klipp håndtakets gummi som vist..



- Dra ut wire som vist på bildet.




- Monter wire som vist på bilde.


- Monter bremsespaken som vist ifølgende bilder.



- Flytt plastdekselet som vist..

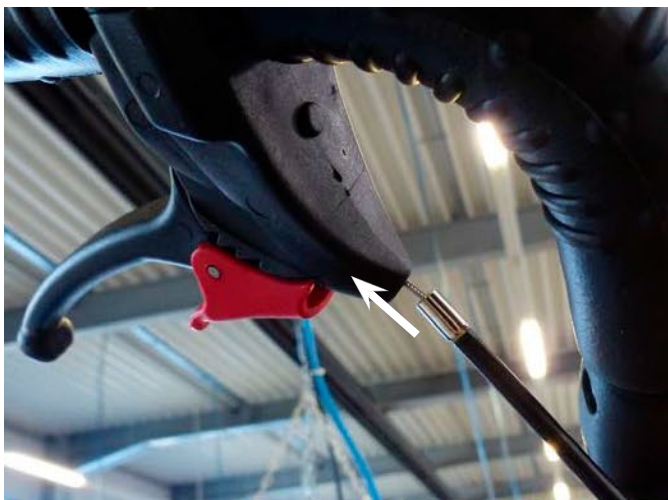


- Flytt bowden-kabelen til markeringen.

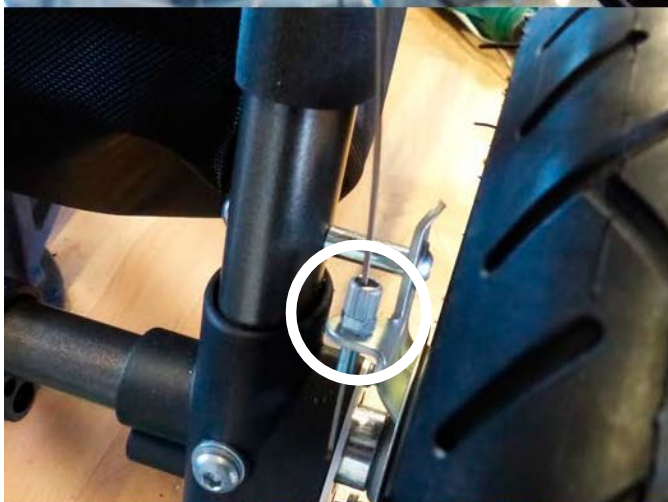

- Før kabelen som vist.



- Før kabelen som vist..

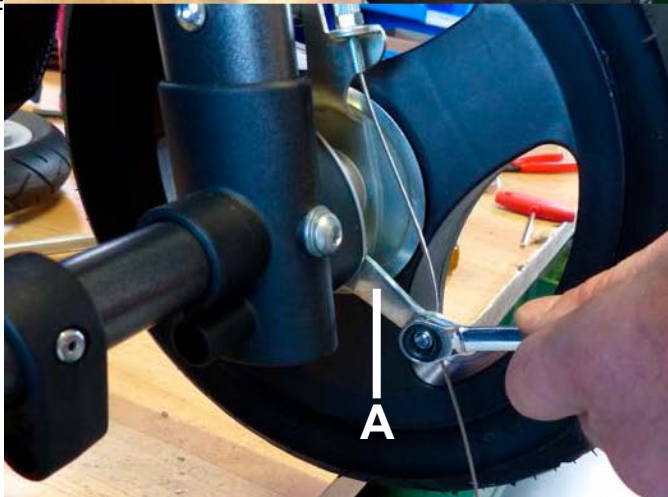

- Flytt spaken **A** opp til hjulet slipper litt. Fest deretter mutteren som vist.



- Klipp av wire som vist.



- Klem på kabelklemmen som vist.



- Løsne og fjern M6 x 12(se markeringen).
- Sett inn M6x16 inkludert skiven som vist..



- Stram bolten.



- Skru fast naglene fra innsiden..



- Sett inn naglen inkludert 3 skiver og kabelføring fra innsiden..



- Nitt tilkoblingen.

- .





medemagruppen