

Vedr.: Mo-vis ledsagerstyring – ny funktion	PUP nr.:	20-009
	Udarbejdet af:	LPA
	Dato:	06-08-2020
	Intern <input checked="" type="checkbox"/>	Ekstern <input checked="" type="checkbox"/>

Mo-vis ledsagerstyring har fået en ny funktion. Denne ændring gælder fra serienummer: 1600

Serienummeret findes på bagsiden af Mo-vis ledsagerstyringen.



Ændringen er endnu ikke bagud kompatibel.

Ledsagerstyringen kan overtage styringen ved at trykke på denne knap i ca. 2 sekunder (til lampen lyser).



Når styringen skal tilbage til brugeren, er det på Joysticket. Man trykker én gang på knappen Profile, og brugeren har kontrollen igen. Man kan IKKE fra ledsagerstyringen skifte tilbage til brugeren.



I programmet skal der være følgende indstillinger i tilfælde af R-net JSM1 i kombination med Mo-vis ledsagerstyring.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4	Profile 5	Profile 6	Profile 7	Profile 8
Profile Management	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4	Profile 5	Profile 6	Profile 7	Profile 8
Profile Name	Inne	Inne/ute	Ute	Profile 4	Profile 5	Profile 6	Profile 7	Ledsager
Profile Enable	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes
Mode Enable	(12345678)	[1]	[1 1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
Input Device Type	JSM	Universal	JSM	Universal	Universal	Universal	Universal	Attendant
Input Device Subtype	All	All	All	All	All	All	All	All
Seat Reversal Profile	No	No	No	No	No	No	No	No
Allow Grab	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Configuration	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6	Mode 7	Mode 8
Speeds	Inne	Inne/ute	Ute	Profile 4	Profile 5	Profile 6	Profile 7	Ledsager
Controls								

Hvis man ønsker at kombinere med en Omni, skal felterne JSM være OMNI i stedet.

Hvis feltet står til Universal vil den ikke fungere fuldt ud som ledsagerstyring.



Klaus Smedegaard
R & D Manager

