



Tovertafel 2 – «quick-guide»

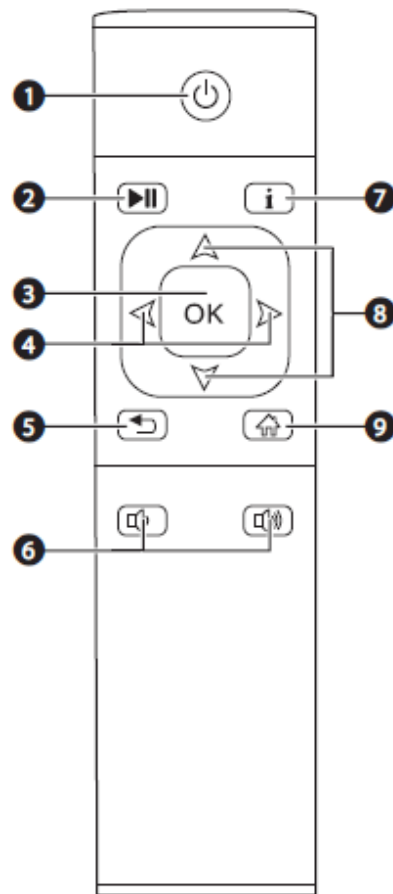

medemagruppen

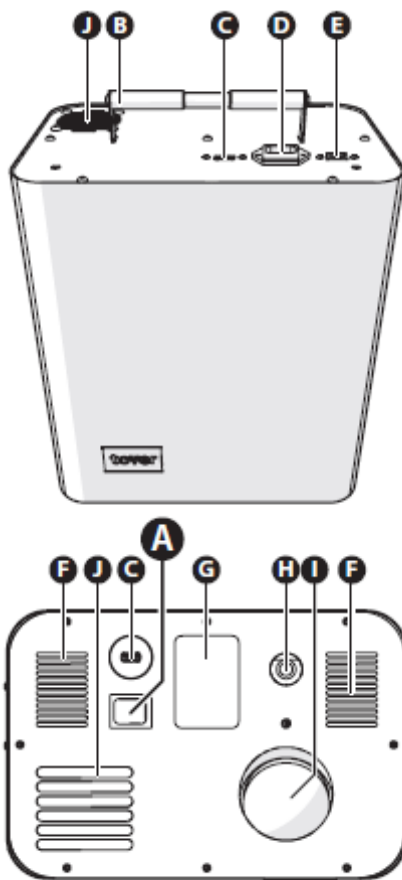

- A) Afbryder
- B) Ophængsbøjle/bærehåndtag
- C) USB kontakt (1 på oversiden, 1 på undersiden)
- D) Strømkontakt
- E) Ethernet port for kablet netværk
- F) Højtalere
- G) IR modtager og LED indikator
- H) Kamerasensor
- I) Projektorlinse
- J) Ventilatorgitter

- 1) On/Off knap – Starter Tovertafel eller sætte den i dvale (dette forudsætter at afbryderen er på tændt)
- 2) Pause knap – pause og genstarte et spil
- 3) OK knap – bekræfte et valg
- 4) Navigation højre/venstre – navigere gennem menuen eller spillene
- 5) Tilbage knap – returnere til forrige billede
- 6) Volumknapper – skru op eller ned for lyden
- 7) Informationsknap – ekstra information hvis dette er tilgængelig
- 8) Navigation op/ned – navigere gennem menuen eller spillene
- 9) Hjem knap – returnere til hovedmenu eller gemmer ændringer

LED indikator:

Rødt konstant lys:	Tovertafel i dvale, klar til at startes	Grønt blinkende lys:	Tovertafel starter op
Rødt blinkende lys:	Tovertafel slukkes ned	Blåt blink:	En knap på fjernbetjeningen trykkes ind
Grønt konstant lys:	Tovertafel er tændt		



Starte Tovertafel

1. Tjek om LED indikator G) lyser rødt, hvis ikke tryk på afbryderen A)
2. Tryk en gang på On/Off kontakten på fjernbetjeningen 1) mens den peger mod Tovertafel.
 - LED indikatoren vil begynde at blinke grøn, og efter ca. 20 sekunder kommer et BIP som bekræfter at Tovertafel starter op. Den vil bruge ca. 2 minutter på at varme op til brug. Når LED indikatoren lyser konstant grøn vil projekteringen på bordet komme og Tovertafel er klar til brug.
3. Tovertafel vil starte i et tilfældigt spil, tryk på Hjem knappen 9) for at komme til spil menuen.

Navigere i menuerne

- Du vil finde spil og indstillinger i hovedmenuen. Tovertafel betjenes fuldt ud med fjernbetjeningen som følger med. Brug piltastene 4) og 8) for at navigere i menuerne, og bekræft ønsket valg med OK tasten 3).

Starte et spil

- For at vælge et spil og starte det, gør du følgende, hvis nødvendig tryk Hjem tasten for at returnere til hovedmenu:
 1. Naviger til spilmenuen, brug piltaster for at flytte mellem menuer.
 2. Vælg aktuelt spil med piltaster og tryk OK. Spillet starter nu op umiddelbart.

Korrekt funktion på Tovertafel

- Ved installation skal Tovertafel være justert i forhold til spilleflade (bordets størrelse), bordet farve (lyst eller mørkt), og sensorer skal være kalibreret.

- Oplever du at Tovertafel ikke fungerer optimalt, se følgende punkter:

Dele af spillet projekterer udenfor bordet

- Spillefladen må justeres til bordfladen eller bordet er flyttet efter installation. For justering af spillefladen, se medfølgende brugsanvisning.

Tovertafel responderer ikke korrekt i forhold til håndbevægelser.

- Bevægelsessensoren må kalibreres eller bordfarven er forkert indstillet (lys/mørk). Se medfølgende brugsanvisning for kalibrering og justering af bordfarve.

Slukke Tovertafel

For at sætte Tovertafel i dvale gøres følgende:

1. Tryk en gang på On/Off knappen mens du peger med fjernbetjeningen mod enheden. LED indikatoren begynder at blinke rødt. Enheden behøver ca. 2 minutter til at køle ned.
2. Når Tovertafel er slukket ned vil du høre to BIP og LED indikatoren lyser rødt. Tovertafel er nå i dvalemodus og kan startes op igen ved behov.

For at kunne flytte Tovertafel må følgende gøres i tillæg:

3. Sluk afbryderen A).
4. Strømkabel tages ud af stikkontakten D)

Lad altid Tovertafel køle ned til du hører to BIP før afbryderen slukkes, dette vil forlænge din Tovertafels levetid.