


Monteringsvejledning



 rifton

Beslag sædeenhed HTS – direkte på toilettet

Dele

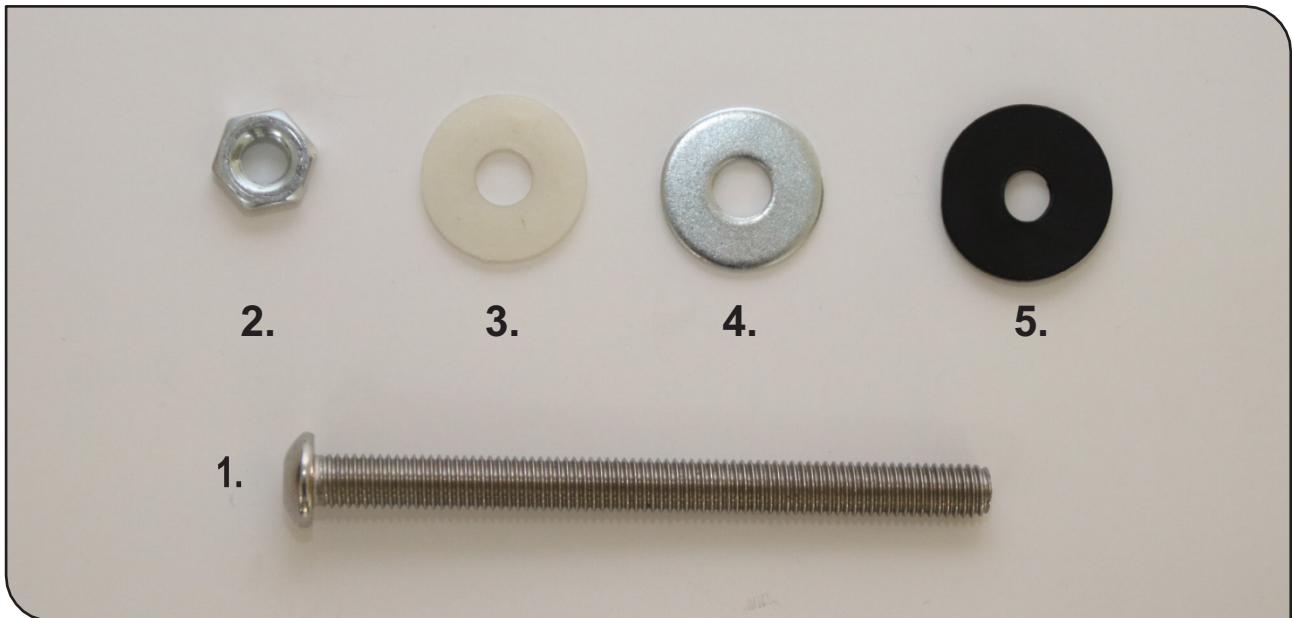

Beslag til HTS toilet indeholder følgende:


1. 2 x lange skruer
2. 2 x møtrikker
3. 4 x plast skiver
4. 4 x metal skiver
5. 2 x gummi skiver
6. 1 x monteringsbeslag

Sådan går du frem


Følgende beskriver hvordan du monterer HTS beslaget på toilettet.



Trin 1:
Fjern toiletlåget således at monteringshullerne (A) er synlige

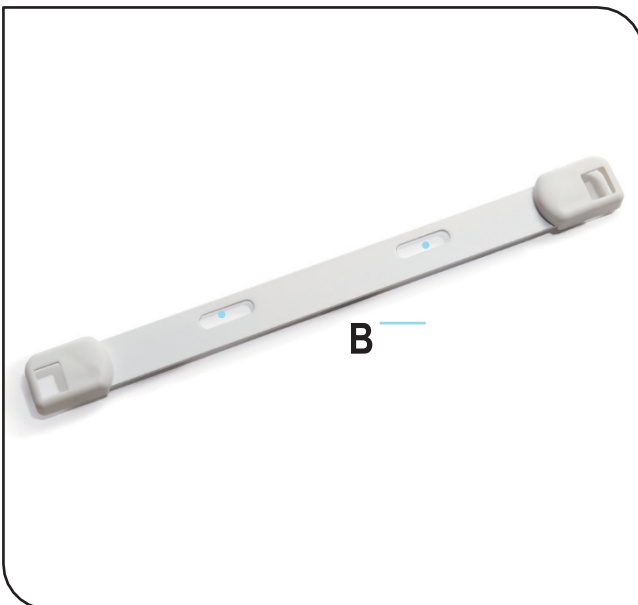


Trin 2:
Placer først en metalskive, derefter en plastskive på skruerne og før derefter skruerne ovenfra igennem holderen (B) på beslaget.

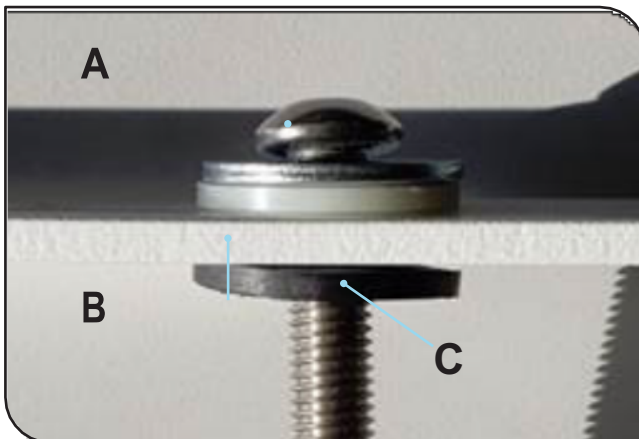

Trin 3:

Før du skruer (A) beslaget (B) gennem toiletkummens monteringshul, trækker du gummiringen (C) på skruen så den placeres mellem holderen og toiletkummen efter montering.

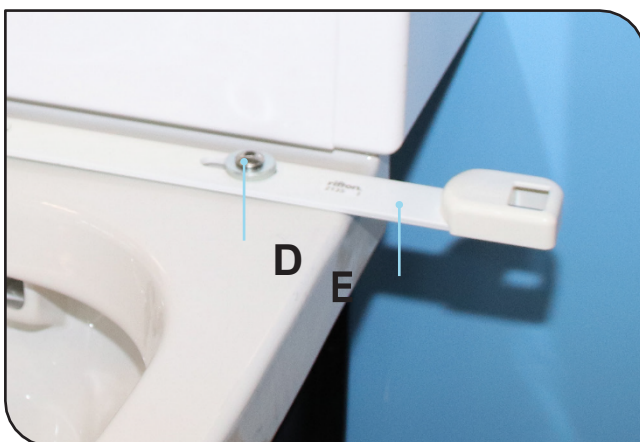

Trin 4:

Efter at skrue (D) er sat på plads med holderen (E), sætter du først plastskiven og derefter metalskiven på skruen. Stram tilkoblingen med de respektive møtrikker.



Trin 5:

Monter hts. toiletsædet på monteringsbeslaget, sæt begge kroge (F) på beslaget (G) ind i holderen og sænk sædet ned på toiletkummen.

For at forhindre fald og personskader, må du sikre dig at beslaget er ordentlig monteret på toilettet. Kontroller stabiliteten på toilettet og monteringsskruerne med jævne mellemrum mens du bruger hts. toiletsædet.