



medemagruppen

### Armlæn højde- og breddejustering

Åbn lynlåse på side og ryg åbnes. Unbrako skruen løsnes og armlænet flyttes op/ned til ønsket højde. Her kan bredden også justeres op til 25 mm ud i begge sider.

### Armlæn vinkel

Ved hjælp af justerskruen på armlænet, kan man ændre vinklen op til ca. 60°. Armlænet kan vippe op for lettere forflytning.

### Styrets højde

Styret kan justeres i højde, op/ned. Fjern gummihætten. Løsn unbrako-skruen. Justér højden, og spænd skruen igen.

### Styrets vinkel

Styret kan justeres frem/tilbage ved hjælp af håndtaget. Skub håndtaget ned, og justér styret tættere på dig, eller længere væk for en bedre kørestilling.

### Sæde frem/tilbage

Træk bøjlen op for at frikoble sædet fra glideskinen. Justér sædet frem/tilbage. Når man slipper håndtaget låses sædet automatisk ved nærmeste stop.

### Sædedrej

Træk håndtaget bagud for at dreje sædet. Sædet kan dreje til begge sider, med stop for hver 45°.

### Sædehøjde op/ned

Løft sædet af. Løsn kontramøtrikken, justér til ønsket højde. Spænd skruen og kontramøtrikken igen.

### Ryglæn og sædedybde

Løsn skruerne i C-skinen på begge sider. Nu kan sædedybden justeres ved at skubbe sæderyggen frem/tilbage til ønsket placering.

### Nakkestøtte højdejustering

Knap trykkes ind og nakkestøtten kan hæves/sænkes efter behov.

### Nakkestøtte vinkel

Nakkestøtten kan vippe frem/tilbage efter behov



### Korrekt instilling skaber de rigtige forudsætninger

Mini Crosser tilbyder et avanceret sæde. En god siddestilling er vigtigt for at kunne køre scooteren trygt og sikkert. Vi viser her de mest almindelige justeringer for at tilpasse scooteren til brugeren.





**medemagruppen**

Medema Danmark A/S - Enggårdvej 7 - Snejbjerg - 7400 Herning - Telefon: 70 10 17 55 - Mail: [info@medema.com](mailto:info@medema.com) - [www.medema.com](http://www.medema.com)